

スピットン・安頭台の除菌・消臭



スピットンは雑菌が繁殖しやすい環境です。細菌数が増えて悪臭の原因にもつながります。こまめにグリーンアクアで除菌と消臭を行ってください。

①直接スピットン・安頭台へスプレー噴射してください。(5倍濃度)湿気の多い水回りには細菌が繁殖しやすいのでスピットンは特にこまめに除菌してください。

ユニットの清掃



肝炎対策としてユニット本体、ユニット周りの除菌水として使用してください。ドクターの身を守る！感染対策としてお役に立てます。

- ①ユニットを水ぶきで汚れを落してください。
- ②グリーンアクア(5倍)をユニットへ噴霧。
- ③1分～3分程度そのまま。
- ④最後に衛生的なタオルで拭き取ってください。
(電解水はアルコールより揮発性が劣りますので、最後に拭き取ってください)

器具類には目に見えない血液や細菌が付着している場合があります。グリーンアクアは①次亜塩素酸イオンで洗浄⇒②次亜塩素酸で除菌を行います。有機物を分解する次亜塩素酸イオンはグリーンアクアの特徴です。

- ①流水で器具の汚れを落とす。
②グリーンアクア(5倍)をスプレーで噴霧します。
(スプレーの場合、薬液が届いていない場所は除菌されておりません。)
③最後に腐食防止の為、流水で洗い流してください。
(注意:高濃度、長時間の浸漬は腐食の原因となります。)
*こちらの用途で使用される場合は一度弊社にお問い合わせ下さい。

器具類の除菌

印象材の除菌



印象体を除菌する場合、寸法変化や印象表面の損傷に注意が必要です。強アルカリ性の塩素系剤はPH値の関係で印象体に与えるダメージも考えられるので、薬品未使用のグリーンアクアであれば、より安心です。

- ①まずは流水で有機物・汚れを落としてください。
- ②グリーンアクア(5倍)でスプレー噴霧してください。
(スプレーの場合、薬液が届いていない場所は除菌されておりません。)
- ③最後に腐食防止の為、流水で洗い流してください。
(注意:高濃度、長時間の浸漬は腐食の原因となります。)

技工所・石膏模型の除菌



技工さんは模型に付着しているかも知れない、雑菌や肝炎等の感染リスクがあります。必ず作業をする前にグリーンアクアで除菌を行ってください。アルコールの抗菌スペクトルでは対応出来ない細菌・ウィルスもあるので、グリーンアクアの次亜塩素酸イオンで洗浄、次亜塩素酸で除菌というWの効果でお役に立てます。

- ①直接、石膏模型にグリーンアクア(5倍希釀)をスプレーで噴霧してください。
- ②模型を乾燥する事も感染対策につながります。

超音波噴霧器の使い方

「患者さんの身を守る！」という事で待合の衛生管理・感染対策で空間に噴霧します。特にインフルエンザ対策として、空気中に浮遊するウィルスを不活化します。超音波の振動でグリーンアクアを超微粒子化しておりますので、夏でも使えるオールシーズン用感染対策の噴霧器です。噴霧面積にあわせて、いろいろラインナップをご用意しております。

待合室に掲示する感染対策ポスターも付いています！



10倍希釀で空間噴霧！